


生产许可证号: 苏食药监械生产许20010089号
生产备案凭证号: 苏镇食药监械生产备20151006号
产品技术要求/备案号: 苏镇械备20170051号

yuwell 鱼跃

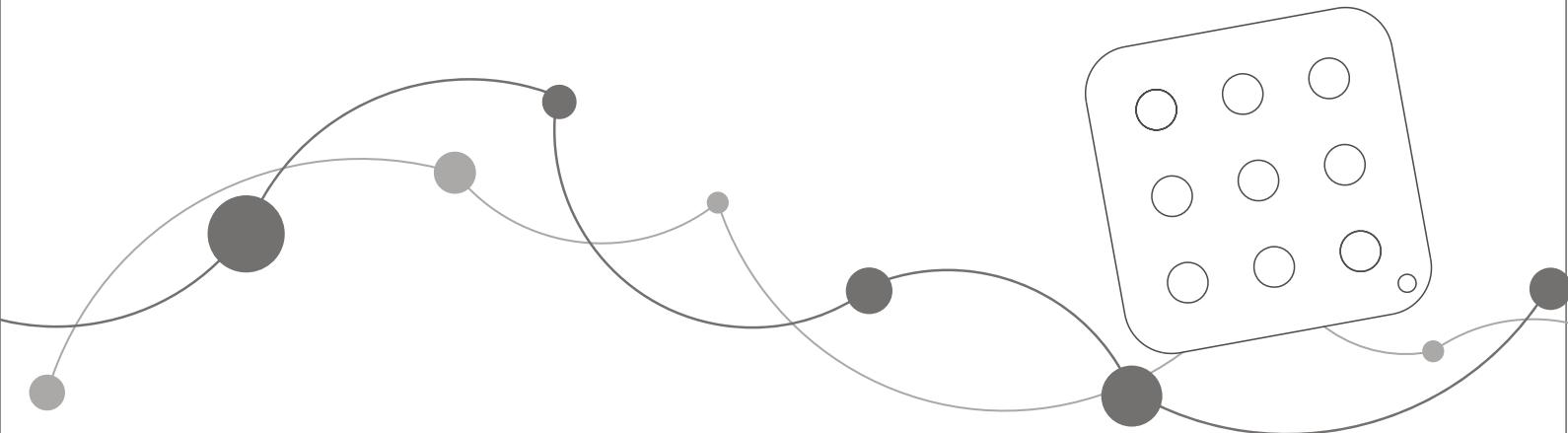

防褥疮床垫 Anti-decubitus Beds Cushion

规格型号: 圆形坐垫B型/方形坐垫B型/靠背垫A型

使用说明书

全国服务热线: 400-828 7768
800-828 6633

<http://www.yuwell.com>

股票代码: 002223

注册人/生产企业/售后服务单位: 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
住所/生产地址: 江苏丹阳市云阳工业园(振新路南)

电话: 0511-86900833

传真: 0511-86900878

邮编: 212300

修订日期: 2017年06月

430500-0A
 纸

使用产品前, 请仔细阅读使用说明书
生产日期见合格证或包装

一、适用范围

- ▶ 用于术后或长期卧床患者预防褥疮或用于减轻使用者臀部、背部等部位疲劳的缓解。
- ▶ 无禁忌症。

二、性能结构示及组成

- ▶ 本产品由气垫和气嘴组成。

三、主要技术指标

- ▶ 圆形坐垫和方形坐垫最大承载重量100kg。
- ▶ 膨胀后的尺寸：

型式	基本尺寸(毫米)		
	长	宽	高
圆形坐垫B型	460±10(外径)	120±10(内径)	85±5
方形坐垫B型	440±10	440±10	85±5
靠背垫A型	580±10	420±10	/

- ▶ 本机中有关安全要求的符号及其含义



四、使用方法

- ▶ 本产品可采用打气筒对准气嘴或其他方法进行充气。

- ▶ 本产品平放在椅子中间，均限单人使用。

五、维护保养及注意事项

- ▶ 此处所示警告与注意，用于正确安全使用产品，防止对用户或他人造成危害或带来损害。警告与注意内容如下：

图例	内 容
△注意	表示错误使用时，有可能发生人员伤害或物品损坏
①	①记号表示强制(必须遵守的事情)。具体强制内容在①中或者附近用文字或图画表示。左图表示“一般的强制”
②	②记号表示禁止(不允许的事情)。具体禁止内容在②中或者附近用文字或图画表示。左图表示“一般的禁止”

- ① 体重超过100kg的人不宜使用圆形坐垫和方形坐垫。
- ① 充气时要控制压力以防充破气囊。
- ② 切勿接触尖锐物质，以防划破和刺穿气囊，造成漏气。
- ① 应保持产品的清洁卫生，经常用中性洗涤剂清洗表面。
- △ 注意：防酸、防碱。
- ① 本产品放置在干燥、通风且无腐蚀性气体的室内。
- ▶ 对废弃物的处理应按城市有关环境保护的规定进行处理。
- ▶ 产品使用期限：使用期限1年。
- ▶ 附件清单：说明书1本，合格证1张。

六、售后服务

- ▶ 本产品系软体产品，购买时请务必验证气密性和表面质量状况，产品一经购买使用，将不得退回。

对产品保留技术、外观变更的权利，如有变更恕不另行通知，敬请见谅！