

品而造成的故障；3、在使用、搬运的过程中不慎跌落而造成的故障；4、使用不当，造成漆层脱落；5、没有按照说明书正确方法操作而造成故障；6、不可预见的自然灾害(如：火灾、地震、水灾等)所造成的损坏。

八、其他注意事项

更换周期及更换方法说明：

- ▶ 手握更换周期：根据实际使用状况确定。
- ▶ 更换方法：请联系厂家更换。
- ▶ 底塞更换周期：6个月或根据实际使用状况确定。


九、保修卡

产品型号		出厂编号	
购买日期		经销商(盖章)	
发票号码		用户姓名	
用户地址		电 话	
保 修 记 录			
日 期	修理内容	修理者	

对产品保留技术、外观变更的权利，如果有变更恕不另行通知，敬请见谅！

生产许可证号：苏食药监械生产许20010089号
 产品技术要求/备案号：苏镇械备20170045号
 生产备案凭证号：苏镇食药监械生产备20151006号

yuwell 鱼跃

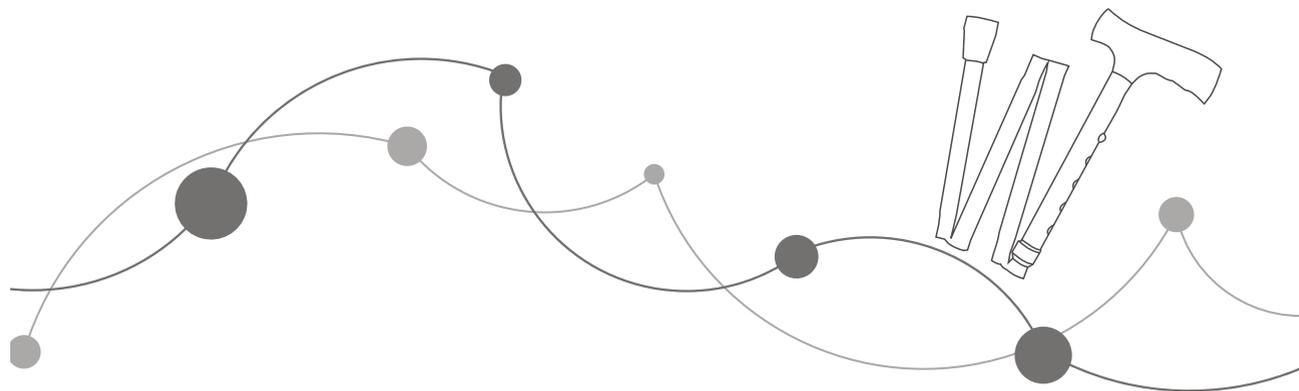

病人移动辅助设备 (电商专供)
 Equipment For Patient Mobility

使用说明书

全国服务热线：400-828 7768
 800-828 6633

http://www.yuwell.com
 股票代码：002223

备案人/生产企业/售后服务单位：江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
 住所/生产地址：江苏丹阳市云阳工业园(振新路南)
 电话：0511-86900833
 传真：0511-86900878
 邮编：212300
 修订日期：2017年06月

530400-0C

使用产品前，请仔细阅读使用说明书
 生产日期见合格证或包装

一、产品用途

- ▶ 本产品用于支撑下肢功能损伤患者，以减轻患肢承重，增加患者站立行走稳定性并辅助行走。
- ▶ 无禁忌症。

二、结构形式

- ▶ 病人移动辅助设备手杖型可分为：伸缩调节式、折叠式、三角平凳式和多脚式。

三、主要性能与结构

- ▶ 产品由手握、装饰套、上撑管、下撑管、底塞组成。

型号	形式	调节范围 (cm)	节数	备注
YU828手杖型	伸缩调节式	80~102	—	
YU838手杖型	折叠调节式	84~94	5	
YU821A手杖型	伸缩调节式	76~96	—	
YU821B手杖型	伸缩调节式	76~96	—	
YU821C手杖型	伸缩调节式	76~96	—	
YU823手杖型	伸缩调节式	95~115	—	
YU821防滑手杖型	伸缩调节式	76~96	—	带防滑针
YU839手杖型	伸缩调节式	99.5~119.8	—	
YU852手杖型	多脚式	68~88	—	底座电镀




1、伸缩调节式



图一

2、折叠式

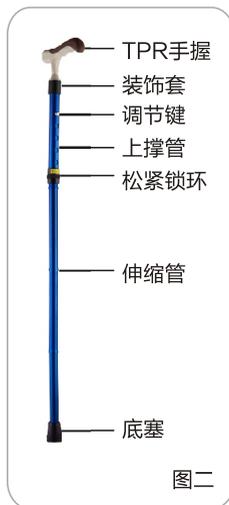

图二

3、多脚式




图三

四、使用方法

▶ 选择长度

底端放在脚外侧 20 cm处，肘部稍稍弯曲 30~40度，在这种状态下选择长度标准。

(图四)

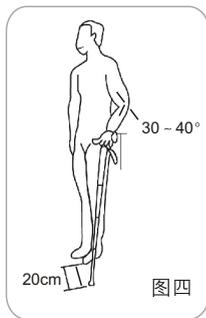

▶ 长度调节法

- 1、抓住产品上端部分，按住调节键，拉长并调节到自己合适的位置即可。
- 2、调节键进行拉、缩调节时，注意要确认听到“咔哒”声，表明调节键调节到位。

⚠ 注意：YU838手杖型橡皮筋有自然弹力和伸缩力。不要弹到他人或自己的脸部。

▶ 收缩法

YU828手杖型、YU821A手杖型、YU821B手杖型、YU821C手杖型、YU823手杖型、YU821防滑手杖型、YU839手杖型、YU852手杖型调到长度调节键最短处的调节孔。

▶ 收缩折叠法

YU838手杖型收缩折叠时，一只手拉住手握，另一只手拉伸缩管，在三个接头处进行弯折，将折叠成四段的伸缩管套入卡扣后装入包装内。

▶ 使用

- 1、YU852手杖型的底座四脚中较短的两脚在身体内侧，当手杖用于另一只手时，按住调节键，握住手握旋转180°，听到“咔哒”声即可使用。
- 2、YU821防滑手杖型需使用防滑针时，将紧定螺栓向下掰至槽口内，底塞底端露出防滑针，使用完毕后将紧定螺栓恢复原位即可。

五、注意事项

本机中有关安全要求的符号及其含义

符号	含义	符号	含义
	向上		易碎物品
	怕雨		表示错误使用时，有可能发生人员伤亡或物品损坏
	警告		表示错误使用时，有可能发生人员伤亡或其他不可预见的伤害

- ▶ 使用前仔细检查各个部位，如发现手杖底端底塞损耗等异常情况，请及时更换。
- ▶ 使用前确保调节键一定要调节到位，即听到“咔嗒”声，才可使用。
- ⚠ 注意：随时检查在使用过程中出现松动等异常情况。
- ▶ 在易滑路面等处使用时要特别小心。
- ▶ YU821防滑手杖型使用时注意防滑针不要戳到自己的脚或者他人的脚。
- ⚠ 警告：请勿将本产品作为登山、防身等活动的工具。

- ▶ 产品使用期限为1年(手握、底塞等易损易耗件除外)。
- ▶ 附件清单：说明书(含保修卡)1张、合格证1张。

六、保管

- ▶ 擦拭产品时应使用软干布。
- ⚠ 警告：切勿将YU838手杖型放置在高温或低温环境中(炉前、寒冷的室外等)，否则会造成橡皮筋出现老化及弹力不足的现象，应确保手杖安全使用。
- ▶ 运输及贮存：本产品需储存在干燥、通风、平稳、无腐蚀性物质的室内。
- ▶ 对废弃物的处理按城市有关环境保护的规定进行处理。

七、售后服务

- ▶ 本产品自出售之日起一周内出现非人为因素的质量问题，本公司负责包退、包换、包修；在正常使用和保管情况下，本产品自出厂之日起一年内(使用期半年)出现质量问题，本公司将给予免费维修；产品自出厂之日起一年后(使用期半年)出现质量问题，用户可根据发票和保修卡到本公司售后服务部、办事处或经销商处，本公司提供零部件给予维修，合理收费。如用户无法提供发票，保修期限以本公司器号或出厂日期延长一个月认定。
- ▶ 以下情况不属于保修范围：1、易损易耗件：底塞、手握；2、擅自拆卸、修理、改造该产